



@PATRISANZ3

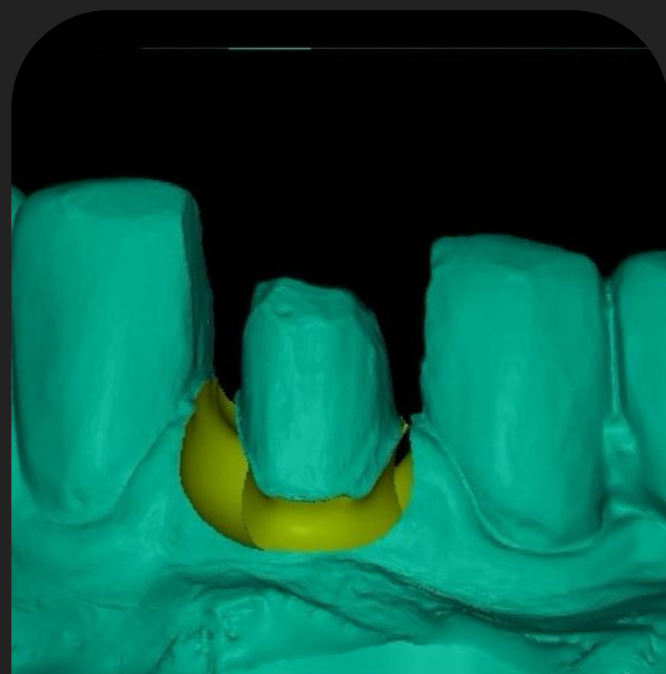

Modelos sobre muñón sin desmontar con encía.

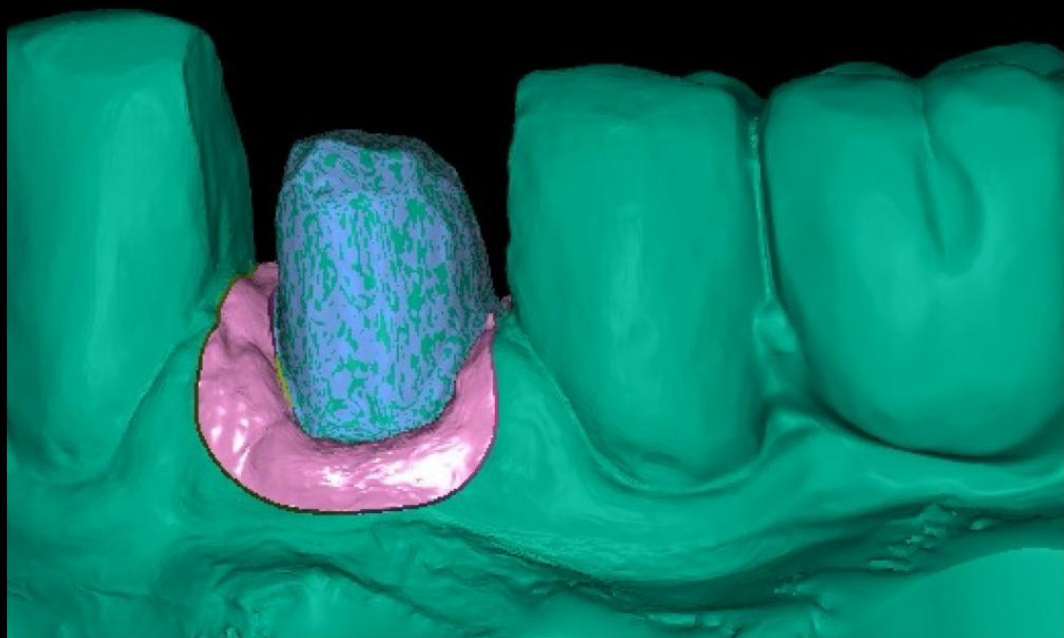

Alineación del Modelo

Tipo:

Plateless model

With extra dies

Guardar como por defecto

Preajustes:

SprintRay
Pro

Clear resin - Hollow 50µm

Altura del modelo
40 mm

Drain hole interval
16 mm

Altura del modelo del maxilar :
Altura del modelo del maxilar i

← ANT.
SIG. →

Alternar troqueles

Selecione los dientes del modelo que deban ser removibles (CTRL+click o SHIFT+click para alternar el troquel adicional):

troquel extra

← ANT.
SIG. →

Paso 1.

Escoger la opción Plateless model-with extra dies, le damos a siguiente y nos aparece troquel extra, no tocamos nada y click en -siguiente.

Paso 2.

✦ ✦ ✦ Diseño de modelo sin placa (?)

TROQUEL ENCIA CONFIGURACIÓN

Máscara de encía

Espesor mínimo 2 mm

Ancho del espacio 0,11 mm

Altura offset 0 mm


☐ Nudos de retención

DESHACER REHACER

+ Añadir Eliminar



Crear modelo

← ANT. SIG. →

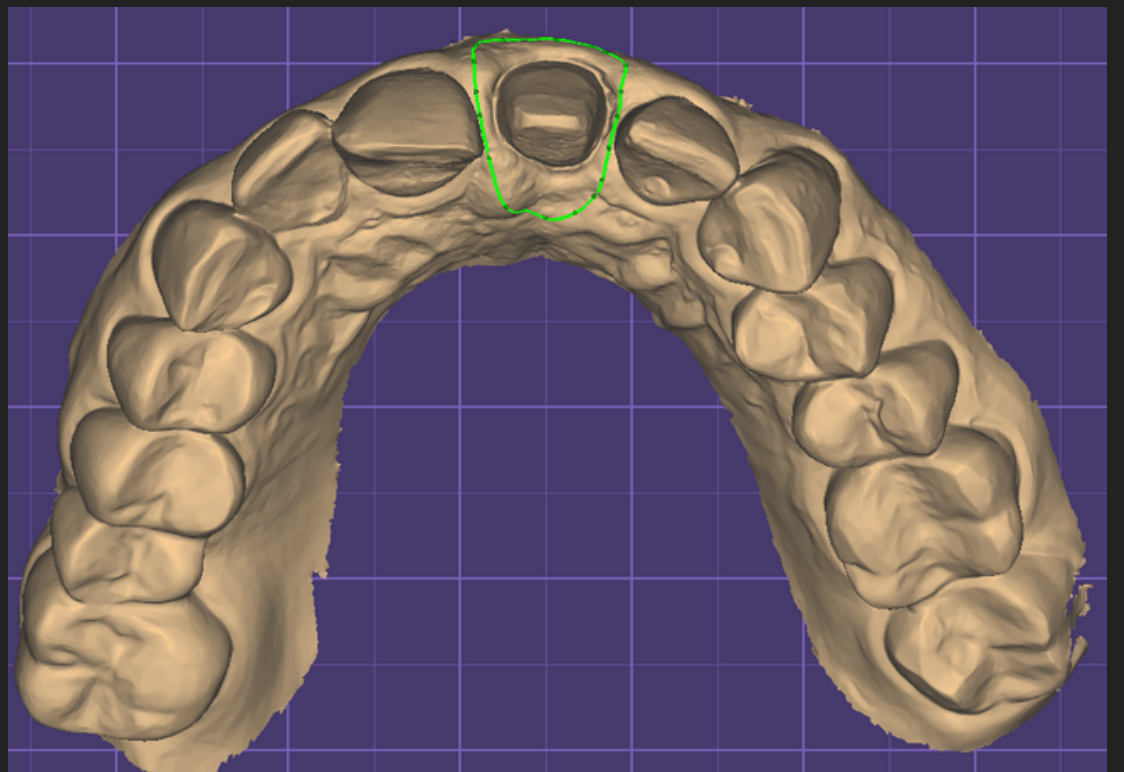

En este paso hacemos click en –Encía–, en espesor mínimo marcamos 2mm de grosor y seguidamente click en –Añadir– y dibujamos el contorno de la encía, muy importante tener en cuenta de las caras proximales para no cortar puntos de contacto, una vez diseñada click en –Crear modelo–.

Paso 3.

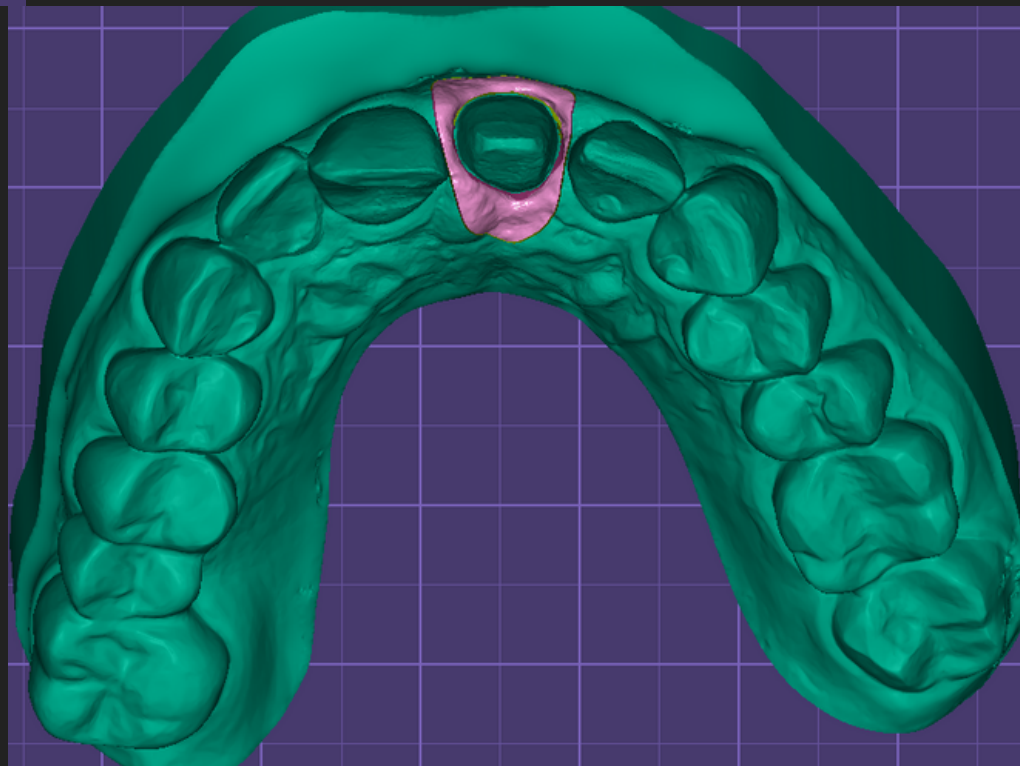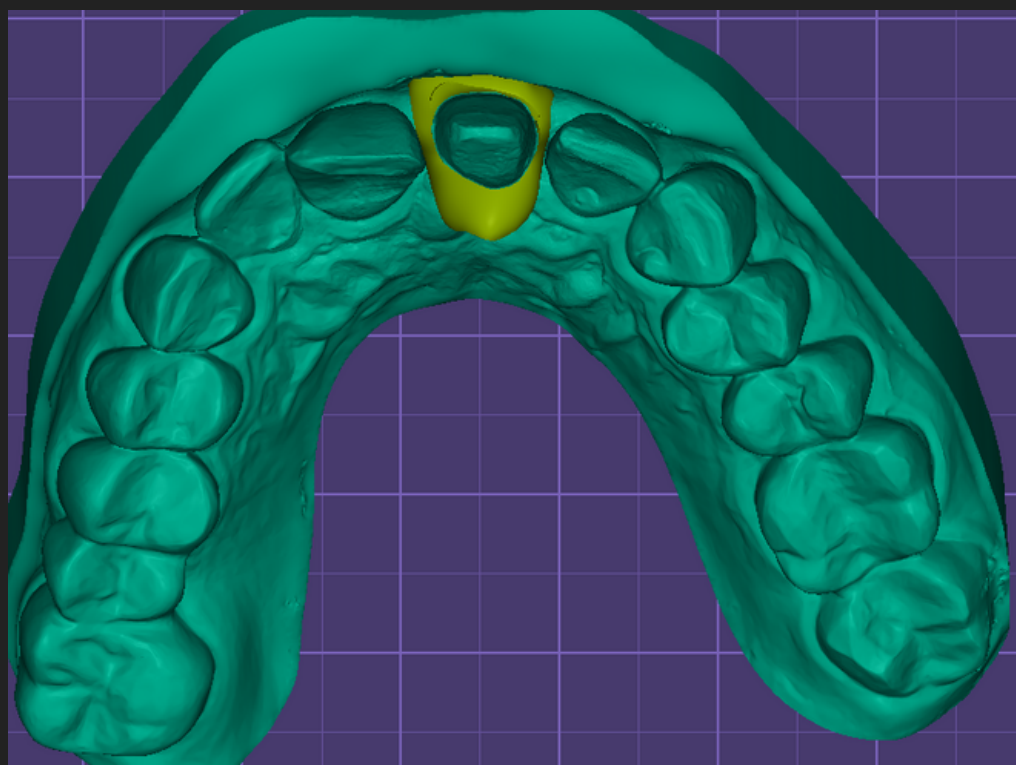

Así es como se crea un modelo sobre muñón sin desmontar con encía, siguiendo estos sencillos pasos.

@PATRISANZ3



Let's Connect

WWW.PATRICIARIBERA.COM

